

**ESTÈL**  
MILANO

**bloomea**<sup>®</sup>  
PARIS



**NeoCare**

SKIN EXPERT



## E SE UNISTE LA VOSTRA ESPERIENZA E L'ENERGIA NEOCARE ?

Abbiamo la risposta: grazie a Tecar-Estetica, Bloomea sta rivoluzionando la corrente ad alta frequenza.

Questa tecnologia di ultima generazione è il risultato di un co-branding francese tra il leader nelle correnti terapeutiche ad alta frequenza e Bloomea, esperta nella cura della pelle.

NeoCare soddisfa le aspettative di una clientela maschile e femminile molto esigente combinando efficienza e comfort nello stesso trattamento.

## LA VOSTRA ESPERIENZA



LA  
NOSTRA  
ENERGIA

## STIMOLA LE RISORSE NATURALI DEL CORPO

NeoCare utilizza correnti ad alta frequenza comprese tra 300 e 1000 KHz, consentendo di lavorare su 2 tipi di cellule: i fibroblasti, che sono le cellule della giovinezza, e gli adipociti, quelle della magrezza



①

AGISCE SULL'  
INVECCHIAMENTO  
CUTANEO

②

SCOLPISCE LA  
SILHOUETTE &  
ELIMINA LA CELLULITE



## AZIONE BIOLOGICA RIGENERANTE

Ricostruisce i tuoi tessuti come, ad esempio, il derma. **BIONEO** riavvierà così gli scambi intra ed extra cellulari degli strati della pelle, che le consentiranno di essere più soda ed elastica. Le linee sottili svaniscono e la pelle ritrova una luminosità naturale.

## AZIONE TERMICA DINAMIZZATA

L'azione complementare di **THERMONEO** richiama in profondità i principi attivi (nutrienti, ossigeno, ecc.) diretti alla zona da trattare. L'attività metabolica dell'area consentirà un rapido consumo dei principi attivi nonché la loro evacuazione. Ma non è tutto, il movimento della circolazione sanguigna e linfatica aiuterà la zona trattata a stabilizzarsi.



## NEO : ACCELERATORE BIO DIMAGRANTE



### CORPO

- RIDENSIFICA LA PELLE
- RINFORZA LE BRACCIA
- DIMINUISCE LA CELLULITE
- RIMODELLA I CONTORNI
- ELIMINA LA RITENZIONE IDRICA
- TRATTA I 3 TIPI DI CELLULITE



### CELLULITE FIBROSA

Presente da tanto tempo, molto difficile da rimuovere. Dura e dolorosa al tatto.




### CELLULITE ADIPOSA

Spesso legata all'eccesso di peso. Morbida, densa e indolore. Situata su stomaco, cosce e glutei.



### CELLULITE ACQUOSA

Legata alla ritenzione idrica, dovuta alla cattiva circolazione venosa e linfatica.

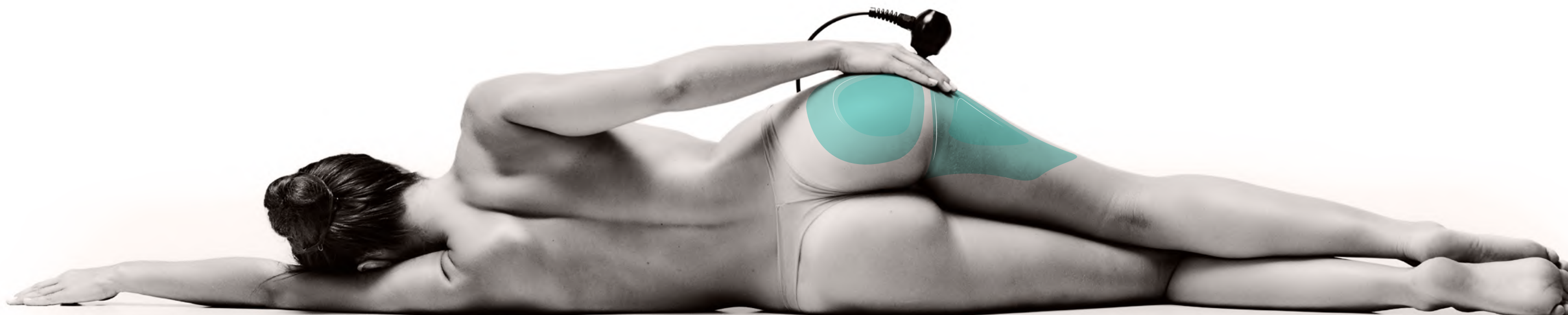



### VISO & DÉCOLLETÉ

- AFFINA LA GRANA DELLA PELLE
- DRENA E RIDÀ LUMINOSITÀ ALLA CARNAGIONE
- ELIMINA LA RITENZIONE IDRICA  
(BORSE SOTTO GLI OCCHI)
- RIDUCE LE RUGHE E LE IMPERFEZIONI  
(CICATRICI DA ACNE)
- LIFTING DEL CONTORNO DEL VISO
- DIMINUISCE IL DOPPIO MENTO
- LISCIA IL DÈCOLLETÉ
- TRATTA I 3 TIPI DI INVECCHIAMENTO



#### SCHELETRIZZAZIONE

Guance incavate / Rughe profonde sulla fronte / Contorno occhi segnato / Orecchie profonde / Contorno labbra pieghettato



#### DECADENZA

Doppio mento / Rotondità del viso e delle guance / Aumento di peso



#### RILASSAMENTO

Palpebre cadenti / Zigomi cadenti / Solchi naso-genieni marcati / Mascelle / Faccia ovale cascante





## PRINCIPIO DI FREQUENZA

Studi scientifici hanno dimostrato che la banda di frequenza compresa tra 300 e 1200 KHz induce un aumento degli scambi intra ed extra cellulari e un effetto diatermico sui tessuti viventi.


- Corrente monopolare :

La corrente passa tra due elettrodi. Un elettrodo mobile (il manipolo) tenuto dal medico e un elettrodo fisso generalmente posizionato nella parte posteriore.

- Corrente multipolare :

La corrente scorre tra i piccoli elettrodi sul manipolo.

NeoCare è dotato di 4 tipi di elettrodi che consentono diverse profondità di azione:

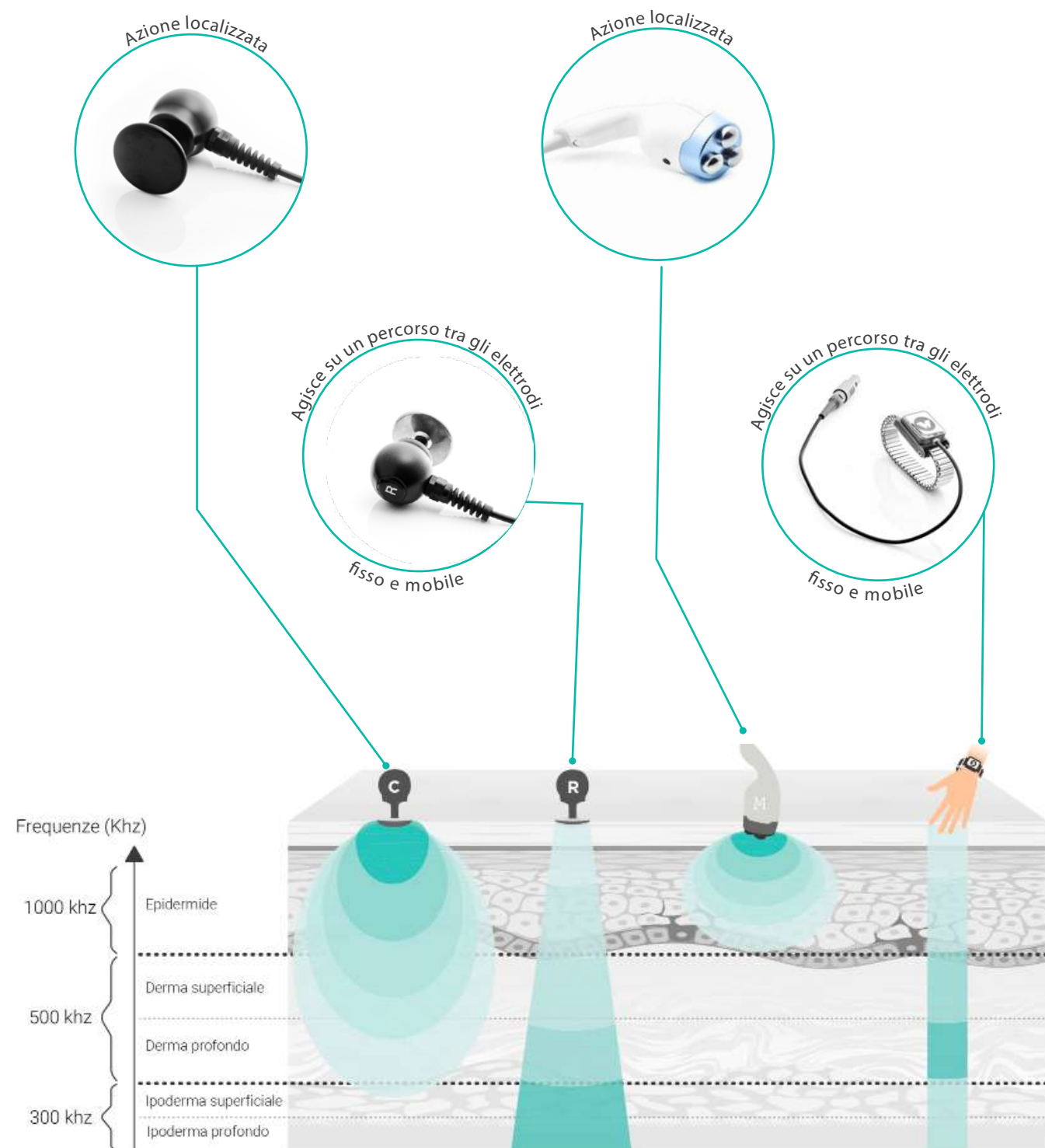

## INNOVAZIONE NEOCARE: IL TUO MANUALE KNOW-HOW AL SERVIZIO DELLA TECNOLOGIA.

Grazie ad un sistema di braccialetti, NeoCare concilia pratica manuale e tecnologia all'avanguardia per poter diffondere l'energia Neo al derma profondo tramite una corrente non invasiva e 100% naturale per il corpo umano.

Si possono trattare le zone più delicate e si può "modellare" la pelle a piacimento per curare il rilassamento cutaneo e la silhouette.



## FUNZIONI UTILI

Per combattere la dipendenza cellulare, il dispositivo NeoCare utilizza 3 funzioni per risultati ottimali e duraturi:



**DYNAMIC**  
Scansione automatica delle frequenze tra gli strati superficiali e profondi dei tessuti molli. Diminuzione della tensione multistrato & richiamo vascolare simultaneo.



CET



**LOW PULSE**  
Gestione delicata delle zone infiammate / Accelerazione delle tecniche di drenaggio agendo sui linfonodi / Ottimizza il rilassamento muscolare.



DEEP CET



**SUPER PULSE**  
Picco di intensità pulsata che consente di lavorare in ipertermia limitando il disagio associato al forte calore sentito. Utilizzato principalmente per tessuto fibroso cicatriziale, al fine di forzare le aree scarsamente vascolarizzate a rivascularizzare e favorire la sintesi del collagene.



RET



BRACCIALE

### RAPIDO

I risultati sono visibili già dalla prima seduta.

### DURATURO

L'effetto desiderato è duraturo mantenendo 1 sessione ogni mese.

### CONFORTEVOLE

Il trattamento non è invasivo ed è del tutto indolore.

# NeoCare

Applicazioni

aggiuntive

BELLEZZA

BENESSERE

CICATRICI & SMAGLIATURE

DETOX

DRENAGGIO



## IL PLUS DI NEOCARE L'energia NeoCare più leggera che mai

### CARATTERISTICHE

Frequenza	300 KHz, 500 KHz & 1 MHz
Modalità	DYNAMIC – LOW PULSE – SUPER PULSE
Peso	19kg (apparecchio + carrello)
Dimensioni	105x35x48 cm

### ACCESSORI

NeoCare 1.0	<p>MANIPOLI CET: 3 elettrodi di diverse diverse dimensioni per un'azione radiale o focalizzata</p> <p>MANIPOLI RET: 3 elettrodi di diverse dimensioni per le piccole e le grandi superfici</p> <p>FISSO: Piastra di ritorno e 10 piastre adesive flessibili</p> <p>MyNeo : Bracciale resistivo (RET)</p>
NeoCare 4.0	MIX3 (Corpo) – MIX3 (Viso)
NeoCare 5.0	2 piastre adesive RET, 2 bracciali RET, doppio cavo resistivo (RET)

2 anni di garanzia sulle apparecchiature - 1 anno per gli accessori.  
Prodotto secondo gli standard ISO9001 - ISO14385 - KIWA 1984.





E' tempo di andare  
controcorrente

DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO PER  
L'ITALIA

T. +39 0399280061  
info@meet-italy.com  
[www.meet-italy.com](http://www.meet-italy.com)

**ESTÈL**  
MILANO